


## Lo strumento CONTOUR®XT



## Da utilizzare solo con le strisce reattive CONTOUR®NEXT

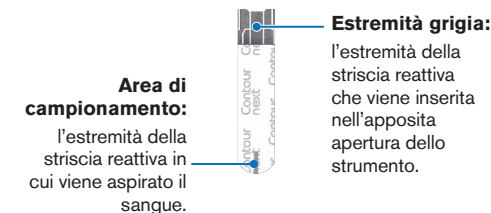


## Istruzioni di base per l'esecuzione del test


Per le istruzioni complete, consultare il Manuale d'uso di CONTOUR®XT e l'insero del dispositivo pungidito.  
**ATTENZIONE:** il dispositivo pungidito fornito con il kit è studiato per essere utilizzato da un solo paziente.

### Preparazione al test

1. Lavare e asciugare bene le mani prima di eseguire il test.
2. Inserire l'estremità grigia della striscia reattiva nell'apposita apertura dello strumento.
3. Lo strumento si accende e sul display verrà visualizzata una striscia reattiva con una goccia di sangue lampeggiante per informare che lo strumento è pronto per eseguire il test.
4. Rimuovere il coprilancetta dal dispositivo pungidito.
5. Allentare il cappuccio protettivo rotondo della lancetta ruotandolo di 1/4 di giro, ma senza rimuoverlo.

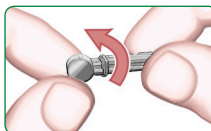

### 6. Inserire saldamente la lancetta nel dispositivo pungidito fino in fondo.

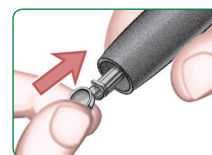


### 7. Svitare il cappuccio di protezione rotondo della lancetta.



### 8. Riposizionare il coprilancetta.



### 9. Regolare il selettore del coprilancetta per scegliere la profondità di puntura.

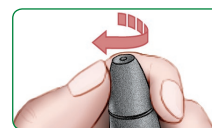

### Prelievo della goccia di sangue


1. Premere con decisione il dispositivo pungidito contro la zona da pungere e premere il pulsante di rilascio.



2. Per favorire la formazione della goccia di sangue, massaggiare la mano e il dito verso la zona della puntura.

### Esecuzione del test

1. Utilizzare solo strisce reattive CONTOUR NEXT con lo strumento CONTOUR XT.
2. Accostare la punta della striscia reattiva alla goccia di sangue. Il sangue viene aspirato nella striscia reattiva attraverso l'area di campionamento.
3. Mantenere la striscia reattiva a contatto con la goccia di sangue finché lo strumento non emette un segnale acustico.

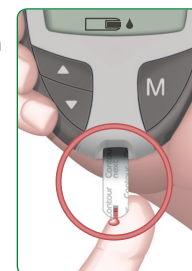

Test dal polpastrello

4. Il risultato viene visualizzato dopo un conto alla rovescia di 5 secondi.
5. Per spegnere lo strumento, rimuovere la striscia reattiva usata per evitare lesioni o contaminazioni di altre persone.



**Per rimuovere la lancetta dal dispositivo pungidito consultare le istruzioni complete riportate nell'insero del dispositivo pungidito.**

**Le immagini del dispositivo pungidito hanno soltanto finalità illustrative.**

**Per uso diagnostico in vitro**

**È necessaria assistenza?  
 Numero Verde: 800-824055  
 www.diabetes.ascensia.com**

PROCESS C	PROCESS M	PROCESS Y	PROCESS K	FOLD
<b>RR DONNELLEY</b>		FILE NAME: 85677888_CntrXT_QRG_IT.indd		NEW COMP BAN: 85677888 REV: 01/17
5050 1st Ave South Suite #101 Seattle, WA 98134 Tel: 206.587.0800 Fax: 206.587.0356		DESCRIPTION: Contour XT Meter Quick Reference Guide	DATE: 02/22/17	CLIENT: Ascensia Diabetes Care
		PROGRAM VERS: InDesign CC(2014)	SKU: MULTI	V0 01/29/17 Initial build V1 02/10/17 DMC Annotations V2 02/22/17 DMC Annotations
		MARKET: IT	SPEC: 10000783886 Rev 1	
		LANGUAGES: IT	PARENT BAN: N/A	BAR CODE: 85677888 (12x12 2D Matrix)
		TRIM SIZE: 4" (H) x 16.5" (W)	PREVIOUS BAN: 84030708	
		MASTER REF: CntrXT_M_QRG_0052_R0003_V1_EU		
<b>LASER PROOF</b>		<b>EPSONS PROOF</b>		<b>SIGNATURE</b>
<input type="radio"/> APPROVED <input type="radio"/> RESUBMIT WITH CHANGES		<input type="radio"/> APPROVED <input type="radio"/> RESUBMIT WITH CHANGES		PROJ. MGR. SIGNATURE _____ DATE _____ PROJ. MGR. SIGNATURE _____ DATE _____ PROJ. MGR. SIGNATURE _____ DATE _____
				VERSION: V2



## ⚠ Potenziale rischio biologico

Tutti i sistemi per la misurazione della glicemia sono considerati a rischio biologico.

Gli operatori sanitari o le persone che utilizzano questo sistema su più pazienti devono seguire la procedura per il controllo delle infezioni approvata dalla struttura di competenza.

Tutti i prodotti che entrano in contatto con il sangue umano devono essere trattati, anche dopo essere stati puliti, come materiali potenzialmente in grado di trasmettere malattie infettive.

L'utilizzatore deve seguire le raccomandazioni per la prevenzione di malattie trasmissibili con il sangue in ambito sanitario come raccomandato per campioni umani potenzialmente infetti.

Per maggiori informazioni, consultare il Manuale d'uso.

© 2017 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Tutti i diritti riservati. Ascensia, il logo Ascensia Diabetes Care, Clinilog, Contour, Glucofacts e il logo Codifica Automatica sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

## Utilizzo della Modalità avanzata

### Impostazione dello strumento in Modalità avanzata

Per impostare lo strumento in Modalità avanzata e utilizzare i marcatori pre e post prandiali e altre funzionalità disponibili:

1. Premere **M** per accendere lo strumento.
2. Premere e mantenere premuto per 3 secondi il tasto **▲** oppure **▼**.
3. L'indicazione L-1 lampeggerà.
4. Premere il tasto **▲** oppure **▼** per visualizzare L-2.
5. Premere il tasto **M** per confermare l'impostazione.



Per scoprire come queste funzionalità aggiuntive possono aiutare a gestire il diabete contattare il Servizio Clienti 800-824055.

[www.diabetes.ascensia.com](http://www.diabetes.ascensia.com)  
[www.patents.ascensia.com](http://www.patents.ascensia.com)

### Dopo aver eseguito un test e aver visualizzato il risultato, utilizzare i marcatori presenti sul display:

PER CONTRASSEGNARE I RISULTATI	COSA APPARE	PER IMPOSTARE	COSA APPARE	COSA SIGNIFICA	UTILIZZO DEL PROMEMORIA
<p><b>Pre prandiale</b></p> <p>Contrassegna il risultato di un test eseguito prima di un pasto.</p> <p>Premere il tasto <b>▲</b> oppure <b>▼</b></p>	(lampeggiante)	Premere il tasto <b>M</b>		<p>Il risultato viene contrassegnato come test pre prandiale. Premere nuovamente il tasto <b>M</b> per impostare un promemoria per eseguire un test post prandiale.</p>	<p>Quando viene emesso il segnale acustico del promemoria, lo strumento si accende e verrà visualizzato il risultato del test pre prandiale.</p> <p>Premere una volta un tasto qualsiasi per disattivare il segnale acustico del promemoria o due volte per spegnere lo strumento. Eseguire un altro test del sangue e contrassegnarlo con  il marcatore post prandiale (si veda la tabella a sinistra).</p>
<p><b>Post prandiale</b></p> <p>Contrassegna il risultato di un test eseguito dopo un pasto.</p> <p>Premere il tasto <b>▲</b> oppure <b>▼</b></p>	(lampeggiante)	Premere il tasto <b>M</b>		<p>Il risultato viene contrassegnato come test post prandiale.</p>	
<p><b>Diario</b></p> <p>Contrassegna qualunque risultato come unico o differente in qualche modo.</p> <p>Premere il tasto <b>▲</b> oppure <b>▼</b></p>	(lampeggiante)	Premere il tasto <b>M</b>		<p>Il risultato viene contrassegnato in memoria come unico. Questo è un risultato che andrebbe annotato nel diario.</p>	
<p> Consente di impostare un promemoria (impostazione predefinita su 2 ore) per eseguire un test post prandiale. Per le istruzioni complete sull'utilizzo dei marcatori e sull'impostazione dell'ora per i promemoria, consultare il Manuale d'uso.</p>					

## Codici e simboli di errore

Per un elenco completo dei codici di errore, consultare il Manuale d'uso.

<b>E1</b>	Temperatura fuori intervallo.
<b>E2</b>	La striscia reattiva non ha aspirato una quantità di sangue sufficiente per eseguire un'analisi accurata. Eseguire nuovamente il test usando una nuova striscia reattiva.
<b>E3</b>	Lo strumento rileva una striscia reattiva usata oppure è stata usata una soluzione di controllo errata. Eseguire nuovamente il test usando una nuova striscia reattiva.
<b>E11</b>	Risultato anomalo. Eseguire nuovamente il test usando una nuova striscia reattiva.

**ASCENSIA**  
Diabetes Care

Distribuito in Italia da:  
Ascensia Diabetes Care Italy S.r.l.  
Via Varesina 162  
20156 Milano – Italia  
Servizio Clienti  
800-824055  
[www.diabetes.ascensia.com](http://www.diabetes.ascensia.com)



0088

Ascensia Diabetes Care Holdings AG  
Peter Merian-Strasse 90  
4052 Basel, Switzerland

85677888  
Rev. 01/17