

Contour
Evolving with you

GlucoContro.online

Consulta i dati dei tuoi pazienti da remoto*



Per assisterli nella gestione
del diabete, invita i tuoi pazienti a condividere
i loro dati glicemici.

www.glucocontro.online

*E' necessario essere registrati in GlucoContro.online e autorizzare la
condivisione dei propri dati con il professionista sanitario


ASCENSIA
Diabetes Care

Facile accesso alle informazioni dei pazienti

Disponibili con un click in un'unica schermata



Facile e veloce accesso ai dati dell'app CONTOUR® DIABETES archiviati nel CONTOUR®CLOUD.



Schermate con **statistiche generali** e **lista completa dei pazienti registrati**



Informazioni personalizzabili per singolo paziente (obiettivi target, fasce orarie)



Mario Rossi ✓

36 anni / età Tipo 1



Report e statistiche (incluso AGP*, PDF stampabili)



Riepilogo dei dati con grafici con codifica colori



Ambiente sicuro per i pazienti per la **condivisione dei dati**



Risultati scaricabili dagli strumenti CONTOUR® senza necessità di permessi di amministratore



*Profilo glicemico ambulatoriale

Un nuovo modo di vedere i risultati della glicemia

Supporta l'interpretazione dei valori glicemici grazie a:

Rapido accesso al Menu



Letture **16**
misur. al giorno **5.33**
senza misur. **0**

⚠ **7%**
Indicatore di gestione del glucosio

⚠ **3**
Molto alto

⚠ **1**
Molto basso



⚠ **78mg/dL**
Deviazione Standard

156mg/dL
Media Pre prandiale

⚠ **245mg/dL**
Media Post prandiale

45%
CV

Riepilogo: informazioni rilevanti per prendere delle decisioni

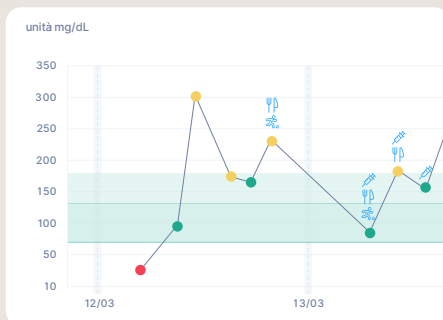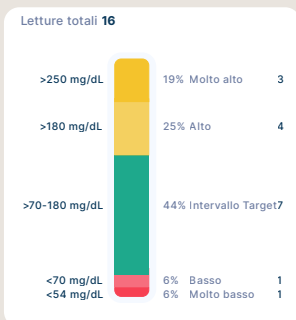

Livelli di concentrazione del glucosio: per vedere la percentuale di risultati nei singoli intervalli target

Distribuzione delle concentrazioni di glucosio: per visualizzare la variabilità delle letture glicemiche

Insulina/Carboidrati/Attività Totali Giornaliere

Domenica 14/03

media **158.20** mg/dL

10.0 U 0.0 g 0 min 0

mg/dL	67	188	280	183	83
unità	8:52	12:11	14:53	18:33	22:03

Tabella delle misurazioni: semplice visualizzazione di tutti i dati raccolti giornalmente

	Conteggio totale	Media	Mediana	Dev. std.	Il più alto	Il più basso	Alto	Target	Basso
Tutti	16	171 mg/dL	178 mg/dL	78 mg/dL	303 mg/dL	41 mg/dL	43.75%	43.75%	12.5%
Digiuno	3	68 mg/dL	67 mg/dL	28 mg/dL	97 mg/dL	41 mg/dL	0%	33.33%	66.67%
Pre-pasto	3	156 mg/dL	176 mg/dL	43 mg/dL	186 mg/dL	107 mg/dL	33.33%	66.67%	0%
Post-pasto	5	245 mg/dL	270 mg/dL	62 mg/dL	303 mg/dL	169 mg/dL	80%	20%	0%
No marcatore	5	167 mg/dL	179 mg/dL	53 mg/dL	229 mg/dL	83 mg/dL	40%	60%	0%

Riepilogo dei risultati: per avere un riassunto più dettagliato delle glicemie dei pazienti




Facile accesso per invitare i pazienti a condividere i propri dati

Registrazione
in 3 semplici passaggi

1. Visita glucocontro.online e clicca su Registrati
2. Inserisci le informazioni richieste
3. Attendi l'approvazione alla tua richiesta dall'amministratore della clinica†

Crea un account

Tipo di account

 Personale <input type="radio"/>	 Professionista <input checked="" type="radio"/>	 Care Giver <input type="radio"/>
---	---	--

Scegli questo tipo di account se ti è stato diagnosticato il diabete.


Scegli questo tipo di account se sei un professionista sanitario.

Scegli questo tipo di account se vuoi prenderti cura di una persona con diabete, e tu non sei diabetico.

Indirizzo e-mail

Nome Cognome

Clicca su “Aggiungi un nuovo paziente”

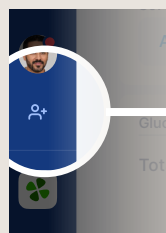

Aggiungi nuovo paziente


Manuale QR Code

Nome Cognome


Nazione

Informazioni facoltative
 Voglio inviare un'e-mail di invito a questo paziente

Aggiungi nuovo paziente

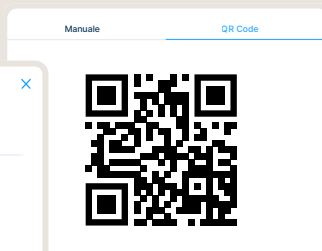

Questo simbolo
✔ indica che il tuo
paziente ha accettato
l'invito a condividere
i dati

 **Mario Rossi** ✔
36 anni / età Tipo 1



Ascensia Diabetes Care
Servizio Clienti:
800-824055 (numero verde)
servizioclienti.it@ascensia.com
www.diabetes.ascensia.it

† potrebbe richiedere fino a 24 ore

©2021 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Tutti i diritti riservati.

Ascensia, il logo Ascensia Diabetes Care e Contour, sono marchi commerciali e/o marchi registrati di Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Apple e il logo Apple sono marchi di fabbrica di Apple Inc. App Store è un marchio di servizio di Apple Inc. Google Play e il logo di Google Play sono marchi di Google LLC. Tutti gli altri marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari e vengono utilizzati esclusivamente per scopi informativi. Non deve essere presunta o dedotta nessuna relazione commerciale o approvazione.

Materiale ad uso esclusivo degli operatori sanitari.

Data di preparazione: maggio 2021. PP-GluCo-GBL-0007. Codice: 92001125 Ver. 07/21